

骨盤臓器脱(POP)用ペッサリー

Milexペッサリー

豊富な種類とサイズ



**Milex ペッサリーは、医療用シリコン製です。
化学的に安定で、オートクレーブ滅菌ができます。(ドーナツ以外)**


- 通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度（ステージ I 及び II）の骨盤臓器脱に適しています。
- ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。
- ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。
- ペッサリーの選択は、トライ＆エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。

【Millex ペッサリー使用例】

ノブ付きリング



ゲルホーン

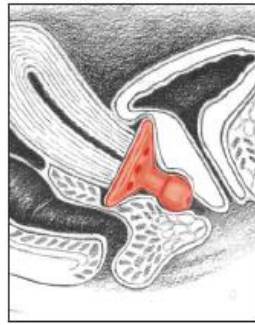

ゲルホーン


ゲルホーン ショート



ドーナツ



キューブ

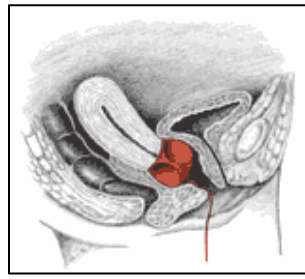

キューブ (穴なし)



キューブ (穴あり)



【使用上の注意】

- 本製品は、使用前に中性洗剤にて洗浄し、流水ですすいだ後、乾燥させてから使用してください。
- 本製品の使用は、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導の下に行ってください。
- 腔内に炎症や出血、感染がある場合は使用しないでください。
- 本製品を取り外した後は、必ず出血や感染がないかを観察し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

■Millex ペッサリー (カタログ番号・形状・サイズ)

一般的名称： 骨盤臓器脱用ペッサリー (34149002)

サイズ	外径*	リング	ノブ付き リング	サポート リング	サイズ	外径*	ドーナツ	サイズ	外径*	ゲルホーン	ゲルホーン ショート	サイズ	外径**	キューブ (穴なし)	キューブ (穴あり)
00	44	MXPER00	MXPERK00	MXPRS00				00	38	MXPGE00	MXPGSS00				
01	51	MXPER01	MXPERK01	MXPRS01	00	51	MXPDO00	01	44	MXPGE01	MXPGSS01	00	25	MXPEC00	MXPECH00
02	57	MXPER02	MXPERK02	MXPRS02	01	57	MXPDO01	02	51	MXPGE02	MXPGSS02	01	30	MXPEC01	MXPECH01
03	64	MXPER03	MXPERK03	MXPRS03	02	64	MXPDO02	03	57	MXPGE03	MXPGSS03	02	35	MXPEC02	MXPECH02
04	70	MXPER04	MXPERK04	MXPRS04	03	70	MXPDO03	04	64	MXPGE04	MXPGSS04	03	38	MXPEC03	MXPECH03
05	76	MXPER05	MXPERK05	MXPRS05	04	76	MXPDO04	05	70	MXPGE05	MXPGSS05	04	41	MXPEC04	MXPECH04
06	83	MXPER06	MXPERK06	MXPRS06	05	83	MXPDO05	06	76	MXPGE06	MXPGSS06	05	44	MXPEC05	MXPECH05
07	89	MXPER07	MXPERK07	MXPRS07	06	89	MXPDO06	07	83	MXPGE07	MXPGSS07	06	51	MXPEC06	MXPECH06
08	95	MXPER08	MXPERK08	MXPRS08	07	95	MXPDO07	08	89	MXPGE08	MXPGSS08	07	57	MXPEC07	MXPECH07
09	102	MXPER09	MXPERK09	MXPRS09				09	95	MXPGE09	MXPGSS09	**外径はキューブ面の直径 (mm)			
10	108	MXPER10	MXPERK10	MXPRS10	*外径はリング部の外径 (mm)										

製造元： クーパーサージカル社 (米国)

医療機器認証番号： 226AIBZX00058000

製造販売元：

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
http:// www.fuji-medical.co.jp

販売代理店：