


骨盤臓器脱(POP)用ペッサリー

Milexペッサリー

身体に優しいシリコン素材です。
汎用性のある種類とサイズを豊富に揃えました。

新タイプ追加

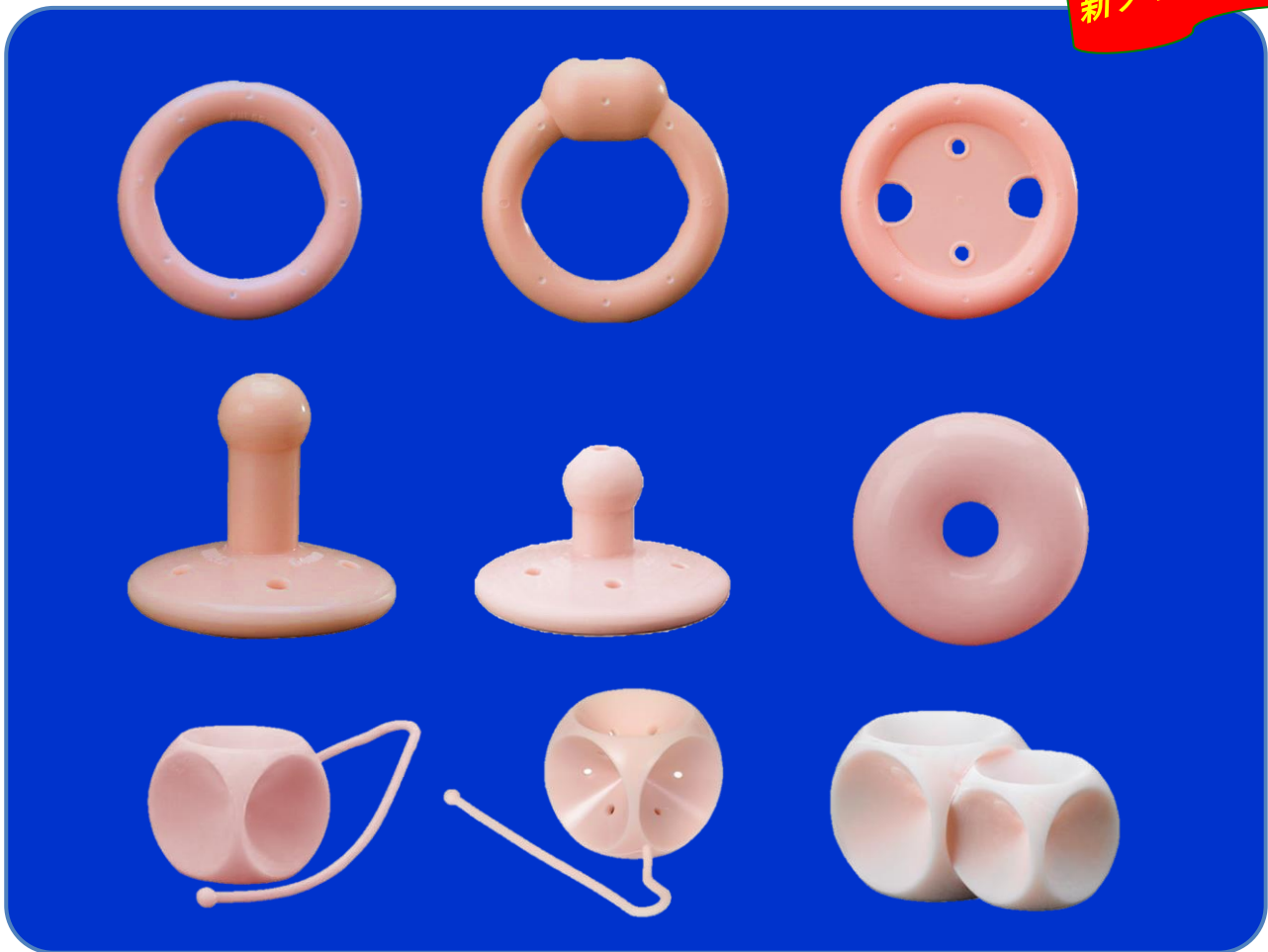


Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。

- 通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度（ステージ I 及び II）の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。
- ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。
- ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。
- ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。


ノブ付きリング




ドーナツ

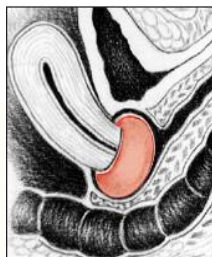


ゲルホーン/ゲルホーン ショート

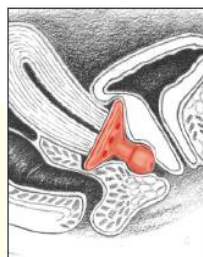

キューブ (穴なし・穴あり)

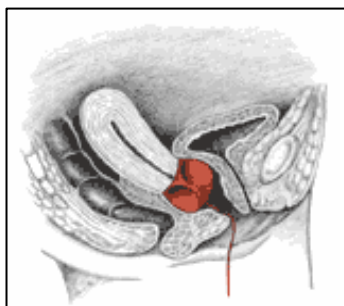

タンデムキューブ

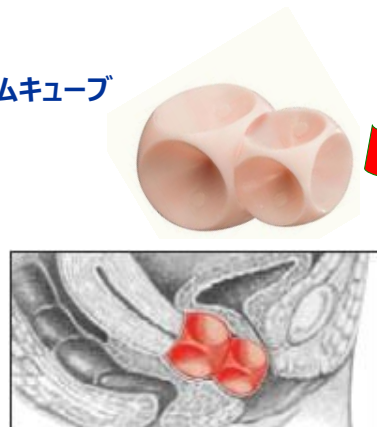

【使用上の注意】

- 本製品は、使用前に滅菌水にて十分洗浄し、乾燥させてから使用してください。
- 本製品の使用は、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導の下に行ってください。
- 膣内に炎症や出血、感染がある場合は使用しないでください。
- 本製品を取り外した後は、必ず出血や感染がないかを観察し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

■ Milex ペッサリー (カタログ番号・形状・サイズ)

一般的名称： 避妊用ペッサリー (35237000)

サイズ	外径 (mm)	リング	ノブ付き リング	サポート リング	外径 (mm)	ドーナツ	外径 (mm)	ゲルホーン	ゲルホーン (ショート)	*外径 (mm)	キューブ (穴なし)	キューブ (穴あり)	サイズ	**外径 (mm)	タンデム キューブ
00	44	MXPER00	MXPERK00	MXPRS00	51	MXPDO00	38	MXPGE00	MXPSS00	25	MXPEC00	MXPECH00			
01	51	MXPER01	MXPERK01	MXPRS01	57	MXPDO01	44	MXPGE01	MXPSS01	30	MXPEC01	MXPECH01			
02	57	MXPER02	MXPERK02	MXPRS02	64	MXPDO02	51	MXPGE02	MXPSS02	35	MXPEC02	MXPECH02	2-0	35	MXPECT2-0
03	64	MXPER03	MXPERK03	MXPRS03	70	MXPDO03	57	MXPGE03	MXPSS03	38	MXPEC03	MXPECH03	3-1	38	MXPECT3-1
04	70	MXPER04	MXPERK04	MXPRS04	76	MXPDO04	64	MXPGE04	MXPSS04	41	MXPEC04	MXPECH04	4-2	41	MXPECT4-2
05	76	MXPER05	MXPERK05	MXPRS05	83	MXPDO05	70	MXPGE05	MXPSS05	44	MXPEC05	MXPECH05	5-3	44	MXPECT5-3
06	83	MXPER06	MXPERK06	MXPRS06	89	MXPDO06	76	MXPGE06	MXPSS06	51	MXPEC06	MXPECH06	6-4	51	MXPECT6-4
07	89	MXPER07	MXPERK07	MXPRS07	95	MXPDO07	83	MXPGE07	MXPSS07	57	MXPEC07	MXPECH07	7-5	57	MXPECT7-5
08	95	MXPER08	MXPERK08	MXPRS08			89	MXPGE08	MXPSS08						
09	102	MXPER09	MXPERK09	MXPRS09			95	MXPGE09	MXPSS09						
10	108	MXPER10	MXPERK10	MXPRS10											

外径はリング部の外径 (mm)

*外径はキューブ面の直径 (mm)

**タンデムキューブの外径は大きいキューブ面の直径 (mm)

製造元： クーパーサージカル社 (米国)

医療機器認証番号： 226AIBZX00058000

製造販売元：

株式会社 フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
http:// www.fuji-medical.co.jp

販売代理店：