

骨盤臓器脱(POP)用ペッサリー

Milex ペッサリー フィッティングキット

最適な Milex ペッサリー 選択するための専用フィッティングキット(練習用マネキン付)です。



推奨洗浄・消毒・滅菌方法

【洗浄】 1. 洗浄液として、ペッサリーを十分浸すことができる容器内に、希釈した中性洗剤を入れ、ペッサリーを少なくとも5分間浸してください。
2. 5分経過後、ペッサリーを柔らかいブラシで洗浄液中にて最低15秒間汚れを落としてください。汚れが落ちていることを目視で確認してください。
3. ペッサリーを洗浄液から取り出し、流水で最低30秒間すすいだ後、ペッサリーを乾燥させてください。

【消毒】 1. ペッサリーを、十分浸すことができる容器内に CIDEX® OPA 等の消毒液を入れます。ペッサリーを消毒液に指示された時間(CIDEX は12分間)浸してください。

2. ペッサリーを滅菌水で完全にすすぎます。ペッサリーを適切な乾燥状態で保管します。

【オートクレーブ滅菌の滅菌条件】

滅菌方式	温度	滅菌時間	乾燥時間
真空排気(Pre-Vacuum)方式	134° C	3分	30分
置換型(Gravity Displacement)方式	121° C	30分	30分
置換型(Gravity Displacement)方式	135° C	10分	30分

【使用上の注意】

●リングタイプ、サポートリングタイプ、ノブ付リングタイプのサイズ選択はサポートリングタイプを使用してください。ノブ付きリングタイプはノブ部があるためサポートリングタイプより約13mm(1/2インチ)直径が大きくなります。

●ドーナツタイプはドーナツタイプの、ゲルホーンタイプはゲルホーンタイプのフィッティングキットを使用してください。

●フィッティングキットはシリコン製ですが、**15分以上装着しないでください。**

●サポートディッシュタイプを使用するペッサリーは現在販売していませんので使用しません。

商品番号	商品名	包装単位
MXFIT-CA	Milex ペッサリーフィッティングキット	1セット

■ Milexペッサリー

(形状/商品番号)



サイズ	外径 (mm)	リング	ノブ付きリング	サポートリング	外径 (mm)	ドーナツ	外径 (mm)	ゲルホーン	ゲルホーン (ショート)	*外径 (mm)	キューブ (穴なし)	キューブ (穴あり)
00	44	MXPER00	MXPERK00	MXPRS00	51	MXPDO00	38	MXPGE00	MXPGSS00	25	MXPEC00	MXPECH00
01	51	MXPER01	MXPERK01	MXPRS01	57	MXPDO01	44	MXPGE01	MXPGSS01	30	MXPEC01	MXPECH01
02	57	MXPER02	MXPERK02	MXPRS02	64	MXPDO02	51	MXPGE02	MXPGSS02	35	MXPEC02	MXPECH02
03	64	MXPER03	MXPERK03	MXPRS03	70	MXPDO03	57	MXPGE03	MXPGSS03	38	MXPEC03	MXPECH03
04	70	MXPER04	MXPERK04	MXPRS04	76	MXPDO04	64	MXPGE04	MXPGSS04	41	MXPEC04	MXPECH04
05	76	MXPER05	MXPERK05	MXPRS05	83	MXPDO05	70	MXPGE05	MXPGSS05	44	MXPEC05	MXPECH05
06	83	MXPER06	MXPERK06	MXPRS06	89	MXPDO06	76	MXPGE06	MXPGSS06	51	MXPEC06	MXPECH06
07	89	MXPER07	MXPERK07	MXPRS07	95	MXPDO07	83	MXPGE07	MXPGSS07	57	MXPEC07	MXPECH07
08	95	MXPER08	MXPERK08	MXPRS08			89	MXPGE08	MXPGSS08	*外径はキューブ面の直径(mm)		
09	102	MXPER09	MXPERK09	MXPRS09			95	MXPGE09	MXPGSS09			
10	108	MXPER10	MXPERK10	MXPRS10								

外径はリング部の外径(mm)

* 表のカラーマーク部分はフィッティングキットに該当するサイズです。

一般的名称: 避妊用ペッサリー(35237000)

製造元: クーパーサージカル社(米国)

医療機器認証番号: 226AIBZX00058000

製造販売元: **株式会社 フジメディカル**

販売代理店:

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
http://www.fuji-medical.co.jp