

Milexペッサリー フィッティングキット

最適な Milex ペッサリー選択するための専用フィッティングキット(練習用マネキン付)です。



●リングタイプ、サポートリングタイプ、ノブ付リングタ イプのサイズ選択はサポートリングタイプを使用してく ださい。ノブ付きリングタイプはノブ部があるためサポ ートリングタイプより約 13mm(1/2 インチ)直径が大き くなります。

推奨洗浄・消毒・滅菌方法

[洗浄] 1. 洗浄液として、ペッサリーを十分浸すことができる容器内に、希釈 した中性洗剤を入れ、ペッサリーを少なくとも5分間浸してください。

- 2. 5分経過後、ペッサリーを柔らかいブラシで洗浄液中にて最低 1 分間汚 れを落としてください。汚れが落ちていることを目視で確認してください。
- 3 ペッサリーを洗浄液から取り出し、流水で最低30秒間すすいだ後、ペッ サリーを乾燥させてください。

[消毒] 1. ペッサリーを、十分浸すことができる容器内に CIDEX®OPA、ディ スオーパ消毒液 0.55%等の消毒液を入れます。ペッサリーを消毒液に指示 された時間(CIDEX は 12 分間)浸してください。

2. ペッサリーを滅菌水で完全にすすぎます。ペッサリーを適切な乾燥状態 で保管します。

[オートクレーブ滅菌の滅菌条件] ドーナッタイプは滅菌しないでください。

滅菌方式	温度	滅菌時間	乾燥時間	
真空排気(Pre-Vacuum)方式	134° C	3 分	30 分	
真空排気(Pre-Vacuum)方式	132° C	4 分	30 分	
置換型(Gravity Displacement)方式	121° C	30 分	30 分	

- ●ドーナツタイプはドーナツタイプの、ゲルホーンタイプはゲルホーンタイプのフィッティングキットを使用してください。
- ●フィッティングキットはシリコン製ですが、15 分以上装着しないでください。
- ●サポートディッシュタイプを使用するペッサリーは現在販売していませんので使用しません。

商品番号	商品名	包装単位
MXFIT-CA	Milex ペッサリーフィッティングキット	1 セット

■ Milexペッサリ

(形状/商品番号)









サイズ	外径	リング	ノブ付き	サポート	外径	ドーナツ	外径	ゲルホーン	ゲルホーン	*外径	キューブ	キューブ
917	(mm)	りング	リング	リング	(mm)	יין	(mm)	クルホーン	(ショート)	(mm)	(穴なし)	(穴あり)
00	44	MXPER00	MXPERK00	MXPRS00	51	MXPD000	38	MXPGE00	MXPGSS00	25	MXPEC00	MXPECH00
01	51	MXPER01	MXPERK01	MXPRS01	57	MXPD001	44	MXPGE01	MXPGSS01	30	MXPEC01	MXPECH01
02	57	MXPER02	MXPERK02	MXPRS02	64	MXPD002	51	MXPGE02	MXPGSS02	35	MXPEC02	MXPECH02
03	64	MXPER03	MXPERK03	MXPRS03	70	MXPD003	57	MXPGE03	MXPGSS03	38	MXPEC03	MXPECH03
04	70	MXPER04	MXPERK04	MXPRS04	76	MXPD004	64	MXPGE04	MXPGSS04	41	MXPEC04	MXPECH04
05	76	MXPER05	MXPERK05	MXPRS05	83	MXPD005	70	MXPGE05	MXPGSS05	44	MXPEC05	MXPECH05
06	83	MXPER06	MXPERK06	MXPRS06	89	MXPD006	76	MXPGE06	MXPGSS06	51	MXPEC06	MXPECH06
07	89	MXPER07	MXPERK07	MXPRS07	95	MXPD007	83	MXPGE07	MXPGSS07	57	MXPEC07	MXPECH07
08	95	MXPER08	MXPERK08	MXPRS08			89	MXPGE08	MXPGSS08	*外径	はキューブ面	の直径(mm)
09	102	MXPER09	MXPERK09	MXPRS09			95	MXPGE09	MXPGSS09	l		
10	108	MXPER10	MXPERK10	MXPRS10		外径はリング	が部の外:	径(mm)		_		

*表のカラーマーク部分はフィッティングキットに含まれているサイズです。

製造元: クーパーサージカル社(米国)

一般的名称: 骨盤臓器脱用ペッサリー(34149002)

医療機器認証番号: 226AIBZX00058000

株式会社フジメディカル 製造販売元:

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F FAX 03-3356-8380 TEL 03-3356-8377 http://www.fuji-medical.co.jp

販売代理店: