

# ファインアトマイザー

LATEX FREE ラテックスフリー

細かい薬液ミストをつくりだします。

## オーラル

ノズル先端径 4.0mm

苦痛を与えない挿管及び抜管に役立ちます。

## ネイザル

ノズル先端径 4.0mm

霧粒が広範囲に粘膜を覆います。

オーラル 咽頭・気管用



ネイザル 経鼻噴霧投薬用



## オーラル

咽頭・気管用麻酔噴霧キット

### ■ ファインアトマイザー（オーラル）

品番	仕様	包装
FAM200	チューブ長 200mm、3mLシリンジ付	25セット / 箱

医療機器届出番号：27B2X00093000304

- チップ径が小さく、狭部への挿入が可能です。
- スタイレットを自在に変形できます。
- 広域に均等に薬液を噴霧できます。
- 霧粒が小さく、粘膜に効率良く付着します。
- 無駄なく薬液を有効利用できます。
- 単回使用により感染を防止できます。




- 気管チューブの挿入挿管困難症例 AWAKEでの挿管
- 気管支鏡の挿入及び抜去
- 経食道超音波診断（TEE）プローブの挿入



#### STEP 1

まず、鼻/口/喉へ局所麻酔剤を噴霧します。麻酔剤の効果が現れるまで数分待ちます。

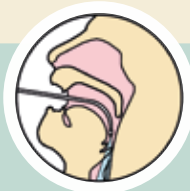

#### STEP 2

ロングノズルのスタイレットを90度に折り曲げ、舌を通過させて咽頭、声門部に追加して麻酔剤を噴霧します。ステップ1と同様、麻酔剤の効果が現れるまで数分待ちます。



#### STEP 3

患者を挿管する姿勢にし、声帯に麻酔剤を噴霧します。これで、挿管の準備が整います。

## ネイザル

耳鼻咽喉科用薬液噴霧器

### ■ ファインアトマイザー（ネイザル）

品番	仕様	包装
FAN020	3mLシリンジ付	25セット / 箱

医療機器届出番号：27B2X00093000303

- ソフトな素材で恐怖感を与えないので小児に安心して使えます。
- 事前のトレーニングが必要ありません。素早く投与できます。
- 無駄のない投与が可能です。
- 霧粒が細かく、広範囲に粘膜を覆います。経鼻投与剤に最適です。
- 単回使用により感染を防止できます。



- 経鼻挿管及び経鼻内視鏡の前処理に
- 救急の現場で
- 小児への薬液投与に
- ホスピスでの薬液投与に



本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

総販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷4-1細井ビル5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店