

ガーゼカウンターバッグ

- 使用済みガーゼをカウントして安心廃棄を -



特徴

- ◇ 背景が透明タイプと青色タイプの2種類があります。
- ◇ 前面は透明フィルムの解放ポケットで、容易にガーゼ、脱脂綿などの投入物を確認して正しくカウントできます。
- ◇ 投入物の重量を測定でき、損失血液の確認ができます。
- ◇ 複数のバッグを一度に吊り下げて使用できます。
- ◇ ワイヤーラックは、ポールスタンドに取り付けて使用することができます。
- ◇ 仕切がピンポイントのため、簡単に引き離せ、大きめの投入物を収納できます。
- ◇ 安全で衛生的なので、病原菌などを吸入する恐れが低減します。



【使用方法】

- ・ワイヤーラックにガーゼカウンターバッグの入った小箱を乗せます。
- ・小箱からバッグを1枚取り出します。
- ・バッグのポケットが正面になるようセットし、ワイヤーラック下部のフックに穴を掛けます。
- ・ポケットが満杯になった場合、新しいバッグをその上に掛けます。
- ・夫々のバッグに10個のガーゼ等を入れることができます。(5個に分けられた大ポケットに仕切を付けて10個のポケットとしています。)
- ・ラテックスフリーです。
- ・ガーゼカウンターバッグは巻いて廃棄することができます。

品名	型番	仕様	包装
ガーゼカウンターバッグ青色	25-551	背面青色、10ポケット 50枚/小箱/5大箱	250枚/箱(50枚/小箱, 5小箱/大箱)
ワイヤーラック	25-501	W29.5 X D7.0 X H19.5cm	1個 / 箱

輸入先: Deroyal Intercontinental 社 (米国)

輸入発売元

販売代理店

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http:// www.fuji-medical.co.jp