

除菌フィルター付 ディスポーザブル排液吸引容器

**BEMIS**

# ハンディビーミス




## 特長

- **constantな流量の確保**  
吸引作業中、一定の流量を継続的に確保します。
- **除菌フィルター**  
吸引ポート部には99.99%の除菌性能を有するフィルターを組み込んでいます。
- **透明なハード容器**  
目盛りが見やすく、回収時の持ち運びが便利です。
- **豊富な品種**  
3000ml, 2000ml, 1200ml, 800mlと4種類ありますので、使用環境に応じて、サイズを選択が可能です。

# ハンディビーミス

## 院内感染の防止と作業の効率化に

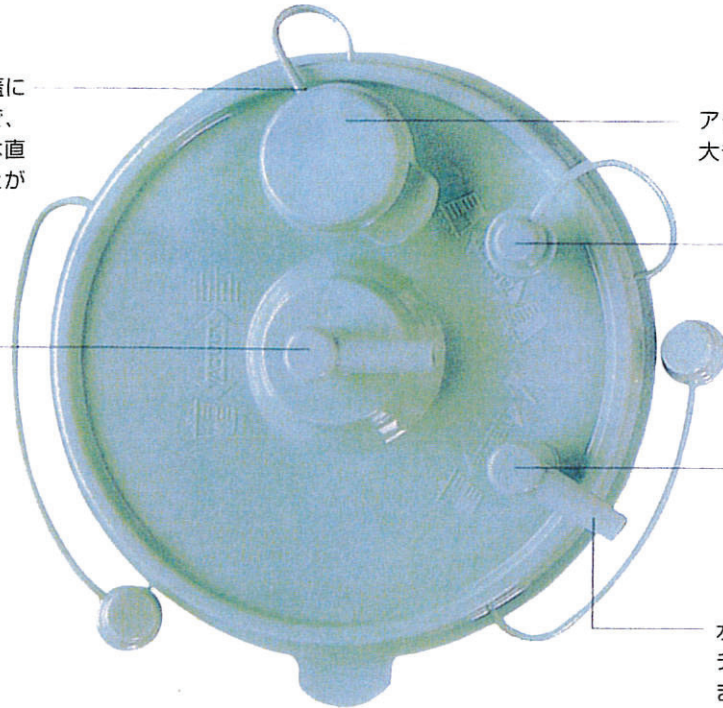

各ポートのキャップは蓋に取り付けてありますので、紛失を防ぎ、必要時には直ちにキャップをすることができます。

吸引ポート：  
最大限の流量を確保し、接続も容易です。


アクセサリポート：  
大きいので固形剤投入に便利です。

連結ポート：  
容器を連結するポートで、連続して大量の吸引を行う場合に用います。

患者ポート：  
大きいので十分な流量が確保できます。

水平の位置にあるため、吸引チューブの接続がしやすく、またチューブつぶれを防ぎます。

※蓋の材質は柔らかいため、吸引が始まるとしっかり閉まり、リークを防ぎます。

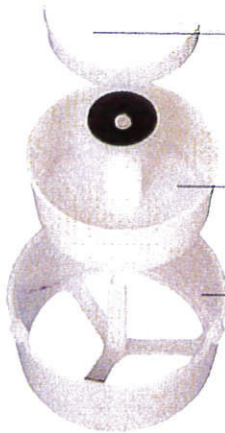

除菌フィルター：  
99.99%の除菌性能を有します。

フロートバルブ：  
容器がいっぱいになったら、吸引ポートを閉じて配管に排液が流れ込むのを防ぎます。

フォームガード：  
フロートバルブをしっかり支え、容器がいっぱいになる前に閉じるのを防ぎます。



800ml：本品は小容量容器で、蓋の形状及びフィルター・バルブの構造が他の品種とは異なる仕様です。

商品番号	仕 様	包 装
3002	容器 3000ml	36個/箱
4944	容器 2000ml	48個/箱
4844	容器 1200ml	48個/箱
4244	容器 800ml	100個/箱
5339	スタンド 4個用	1台/箱
5327	ホルダー 3000ml,2000ml,1200ml用	12個/箱
DB100	固形剤 ハンディゲルA (容量100g)	48本/箱



固形剤 ハンディゲルA：  
排液をゲル化するのに用います。

材質はポリスチレンとポリプロピレンです。適切に焼却炉で処理された時、有毒ガスは発生しません。

届出番号：13B1X00008000001

## 株式会社 フジメディカル

〒160-0004

東京都新宿区四谷4-1 細井ビル5階

TEL 03-3356-8377(代) FAX 03-3356-8380

E-mail : info@fuii-medical.co.jp