

固形剤 ハンディゲル A

固形剤ハンディゲル A は、排液をゲル化するために使用します。



特徴

LATEX ラテックスフリー
FREE

- 固形化することにより、排液や血液等の廃棄処理が容易に行えます。
- ハンディゲルAは、1本（100g）で約3L*の排液を固形化します。
- 血液、体液、尿、嘔吐物、薬剤等を固形化します。

※ 排液の内容によって、固形化の状態は変わることがあります。

| 品番 | 商品名 | 仕様 | 包装 |
|-------|------------|--------|-------|
| DB100 | 固形剤ハンディゲルA | 100g/本 | 48個/箱 |

使用方法

1, ディスポーザブル排液吸引容器に使用する場合

- ハンディゲルAのキャップをはずし、排液吸引容器のアクセサリポート部から固形剤を投入します。
- 固形化したら排液吸引容器のキャップを閉じ廃棄下さい。

2, 血液や薬剤(液体)を固形する場合

- ハンディゲルAのキャップをはずし、対象物に固形剤をかけてください。
- 固形化したら容易に回収できます。

※ 排液の性質により固形化の時間は異なります。

※ 固形剤を何度かに分けて使用する場合は、使用后キャップを正しく閉じて下さい。

注意

使用上の注意

- 本品は吸湿性がありますので、湿気をさけて保管して下さい。
- 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 取り扱い時は、目や口に入らないよう、また、皮膚に付着しないよう注意して下さい。ディスポーザブル手袋を着用下さい。

- 万一目に入った場合は、直ちに水で15分以上洗浄して下さい。もし異常を感じたときは眼科医の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着したときは、水または石鹸水で十分洗い落として下さい。
- 本品は水を吸収すると大変滑りやすくなりますので、注意して下さい。

本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店