

固形剤 ペーパーゲル

排泄をゲル化する固形剤



LATEX ラテックスフリー
FREE



品番	商品名	仕様	包装
GP20	固形剤ペーパーゲル	約18g/個、20個/袋	12袋/箱 (240個)

特徴

- 排泄、血液、体液、尿、嘔吐物、便、薬剤などの含水物をゲル化します。
- ゲル化することにより、廃棄処理が容易になります。
- ペーパーゲル 5本 で約 3L の水又は含水物をゲル化します。
(これらは目安で、排泄の内容によってゲル化の状態が変わることがありますので、適宜御利用本数を増減して下さい。)
- 個包装は水溶紙ですので、そのまま排泄容器に投入できます。
従来のプラスチック製収納容器と比較してゴミの量を減らすことができます。

使用方法

ディスポーザブル排泄吸引容器に使用する場合

- 排泄吸引容器のアクセサリポート部からペーパーゲルを適量投入します。

- 排泄吸引容器のキャップを閉じ、ゲル化を確認した後、院内の手順に従い廃棄して下さい。

注意

使用上の注意

- 本品の個包装は水溶紙なので、水濡れに注意して下さい。
- 本品は、吸湿性がありますので、湿気を避けて保管して下さい。
- 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 取り扱い時は、目や口に入らないよう、また皮膚に付着しないよう 注意して下さい。万一目に入った場合は、直ちに水で15分以上洗浄して下さい。もし、異常を感じたときは、眼科医の診察を受けて下さい。

- 皮膚に付着したときは、水又は石鹸水で十分洗い落して下さい。
- 本品は、水を吸収すると大変滑りやすくなりますので、注意して下さい。
- 20個入りのプラスチック袋は、耐水性と機密性が有ります。尚、使用後は きちんとチャックを閉じて保管して下さい。開封後は早目に御使用下さい。
- 吸水したゲルは配水管を詰まらせることがあります。廃棄する場合は、焼却炉で少量ずつ焼却処理するか、都道府県知事の許可を受けた専門の 廃棄物処理業者に委託処理して下さい。