



# シャープスカウンター

＜使用した縫合針の確認に役立ちます＞

シートからカウントブロックを剥がし、縫合針のパッケージにカウントブロックを貼り付けます。

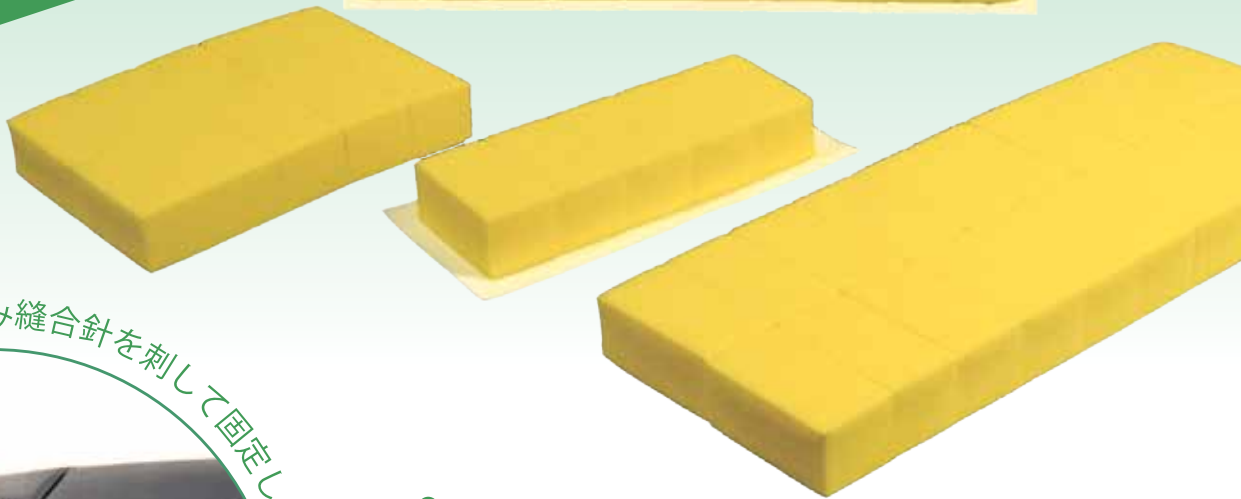

カウントブロックに使用済み縫合針を刺して固定します。

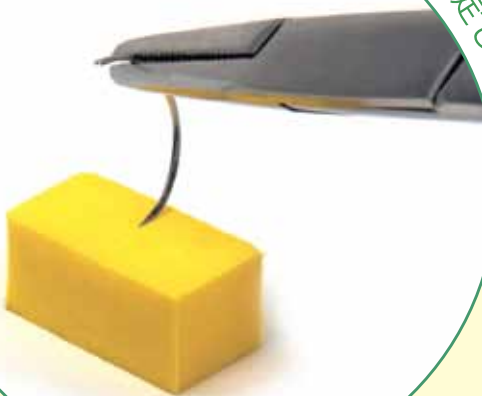

LATEX FREE ラテックスフリー

シャープスカウンター ソフトタイプ

## 特徴

- 使用後の縫合針を安全に固定します。
- 縫合針の使用数量の確認ができます。
- カウントブロックの裏面には接着剤が塗布されていますので、縫合針のパッケージなどに貼り付けてお使い下さい。



品番	仕様	包装
P23010	ソフトタイプ 5 カウンター用	70 個/箱
P23011	ソフトタイプ 10 カウンター用	60 個/箱
P23012	ソフトタイプ 20 カウンター用	30 個/箱
P23013	ソフトタイプ 30 カウンター用	30 個/箱

＜EOG 滅菌済＞

# シャープスカウンター

使用した縫合針の確認とメスの替刃に役立ちます



LATEX FREE ラテックスフリー

シャープスカウンター ハードタイプ

針刺しカウントシートの裏面に接着剤が塗布されています。必要な場合は、針刺しカウントシートを容器本体より取り出し、裏面の剥離紙を取り、清潔域の適当な場所に貼り付けてお使い下さい。

容器本体の両外側面に接着テープが付いていますので、容器本体を接着固定することができます。接着テープの剥離紙を取り、清潔域の適当な場所に貼り付けてお使い下さい。



## 特徴

- 縫合針の使用数量の確認ができます。
- 使用済みメス替刃を磁石で固定します。
- メス刃先を簡単に外す部位を内設しています。

品番	仕様	包装
P23122	20カウンター用	24個/箱
P23123	40カウンター用	16個/箱

<EOG 滅菌済>

輸入販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4 丁目 -1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店