

シバホルダ

SIVA HOLDER

〈シリンジ操作用補助グリップ〉



- 特 徴**
- ・介助なしで、片手で自在に薬液注入や針先のコントロールができます。
 - ・プランジャーグリップは円形なので注入も吸引操作も片手で同時にできます。
 - ・手に掛かる負担が軽減できます。
 - ・滅菌して再使用できます。(ポリプロピレン製)

品 番	仕 様	製品カラー	包 装
SVA2550	2.5mL, 5.0mL 共用シリンジ/プランジャーグリップ	青色	20セット/箱
SVA0100	10mL 用シリンジ/プランジャーグリップ	白色	20セット/箱

総販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

販売代理店

基本的な使用方法

- 1) シリンジグリップとプランジャーグリップを包装袋から取り出します。




写真左: 10mL シリンジ用グリップ

写真右: 2.5mL, 5.0mL 共用グリップ



注意: 使用前に各グリップが、ご使用のシリンジに適合するか確認してからご使用ください。

- 2) シリンジグリップをシリンジのツバに差し込み、回転すると固定されます。

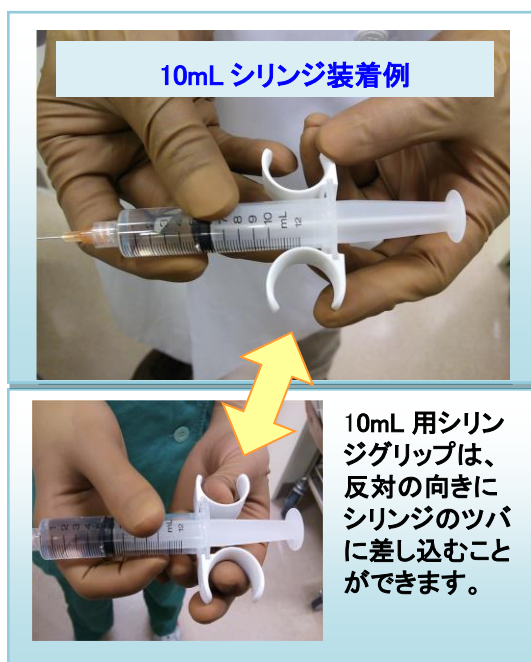

10mL シリンジ装着例

10mL 用シリンジグリップは、反対の向きにシリンジのツバに差し込むことができます。

写真左: 5mL シリンジ装着例, 右: 2.5mLシリンジ装着例



- ・2.5mL シリンジと 5.0mL シリンジは同じグリップを使用。
- ・シリンジグリップは差し込む溝を変えます。
- ・プランジャーグリップは同じ溝を使用します。

- 3) プランジャーグリップをプランジャーのツバにしっかりと奥まで差し込みます。

10mL シリンジ装着例



下写真左から: 5mL シリンジ装着例, 2.5mLシリンジ装着例



- 4) 使用後は、上記2)、3)の逆の手順で、各グリップを取り外してください。
5) 各グリップは滅菌して再使用することができます。EOG 滅菌または過酸化水素低温プラズマ滅菌を推奨します。