

洋式トイレ用採尿容器

# 安心ユーリンパン II

洋式トイレにセットするだけで安心して採尿できる便利な採尿容器です。




## 特徴

- 座位で採尿するため両手が自由となります。  
また、無理のない自然な排尿姿勢で採尿できます。
- 尿カップや蓄尿瓶への移し替えは、溝があるため容易です。
- 便の採取にも使用できます。
- 100mLからは50mL単位で800mLまで目盛がついています。(目盛は目安です。)
- ツバ部分の穴は壁掛け用です。
- 軽量のポリプロピレン製です。



## 使用方法

- 1, 便座をあげます。
  - 2, 「安心ユーリンパン」を便器に載せます。
  - 3, 便座を下ろして挟み込みます。
- ※便の採取時は、前後にセットしてください。  
※単回使用です。再使用しないでください。

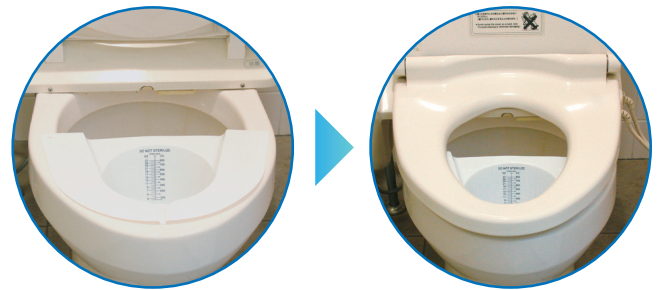

品番	商品名	仕様	包装(枚/箱)
ME8105	安心ユーリンパンII	800ml	100(10枚/袋)

輸入発売元

**株式会社 フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店